



## INSTRUÇÕES DE USO - ESTETOSCÓPIOS SIMPLES PREMIUM

### INDICAÇÃO DE USO

O Estetoscópio Simples Premium é indicado para a ausculta não invasiva dos ruídos cardíaco-respiratórios do organismo.

### FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Simple e Simple Pediátrico: Estetoscópio completo com tubo em “Y” e auscultador simples ou simples pediátrico. Embalado em Caixa de Papelão.

Componentes:



- 1- Membrana de plástico rígido;
- 2- Anel rosqueado de cobre cromado;
- 3- Auscultador;
- 4- Tubo em "Y" de PVC;
- 5- Câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado);
- 6- Fone biauricular de cobre cromado;
- 7- Par de Olivas macias.

### PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Os sons são obtidos através do contato do diafragma com a região de interesse. Esses sons são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do operador. O fone biauricular permite escutar simultaneamente o som com os dois ouvidos.

O Estetoscópio Tipo Simple possui apenas um auscultador simples que pode ser do tamanho adulto ou infantil.

### MODO DE USAR

- Encaixar o fone biauricular nos ouvidos de maneira a isolar todos os sons externos;
- Encostar o diafragma na área a ser analisada;
- Esfregue levemente o diafragma para saber se as olivas estão posicionadas corretamente nos ouvidos;

### CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Evitar choques; não expor as partes plásticas a radiação solar intensa;
- Não tocar o tubo com materiais cortantes;
- Limpar as partes com tecido suave levemente umedecido com água.

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- **Temperatura de Armazenagem:** recomendada na faixa de 0°C a 35°C;
- **Umidade Relativa do Ar de Armazenagem:** máxima recomendada de 85%;

## **TERMO DE GARANTIA**

O Estetoscópio Simples Premium tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal. Estas partes têm garantia de noventa dias, também contados a partir da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado a parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.

## **SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ACCUMED:**

Pelo Telefone: (21) 2775-8929 (Horário Comercial)  
ou pelo e-mail: [sac@accumed.com.br](mailto:sac@accumed.com.br)  
Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda.  
CGC: 06.105.362/0001-23 Inscrição Estadual: 77.701.290  
Rua Rua São Jorge nº 119 - Quadra 70 - Lote 19 a 21- Parte -Vila São Luiz  
-Duque de Caxias – R.J. CEP: 25086-110  
Resp. Técnico: Dr Marcos Jordão - CRQ 3ªReg.: 03212320  
Reg. ANVISA nº: 80275310014  
Fabricante: Wenzhou Instruments Co.  
País de Fabricação: República Popular da China