

Importante

O presente documento serve apenas para simplificar e clarificar os passos para o correto funcionamento do equipamento. **No entanto, continua a ser crucial a leitura do manual do usuário.**

Atenção

Certifique-se que não há divergências nos acessórios que compõem o equipamento, verificando o checklist (disposto na parte interna da embalagem)

Manual Aplicativo


Baixe a versão mais recente do manual diretamente no site da Quark Medical:

quarkmedical.com.br/pdf/FAMILIA_DUALPEX_961.pdf

OBS: A leitura do manual do usuário é imprescindível para boas práticas de uso.

Instruções Gerais para Uso

1- A utilização do equipamento somente deve ser feita pelo Fisioterapeuta ou por profissional treinado e orientado por ele.

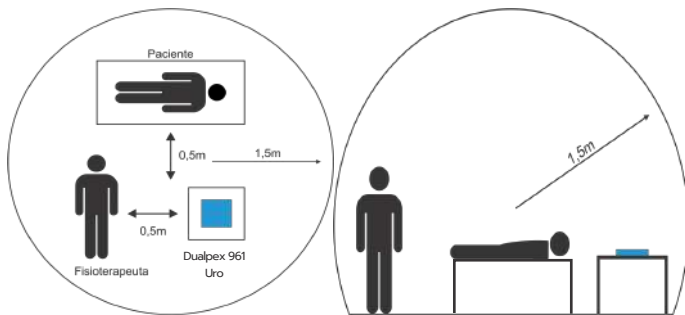

2- Conecte o cabo de força no equipamento e o plug na tomada da rede elétrica. Não há necessidade de verificar a tensão da rede elétrica (117V ou 220V), pois o equipamento fará a seleção da voltagem automaticamente.

3- Ligue o equipamento através da chave Liga/Desliga. A mensagem com o nome do equipamento e revisão do software aparece no display. Durante este processo, ouve-se o som da campainha.







4- Os eletrodos anal e vaginal devem ser utilizados através do adaptador que acompanha o produto.



*O **Eletrodo Anal** possui 1 par de anéis e deve ser utilizado apenas com o **cabo branco no canal 1**.

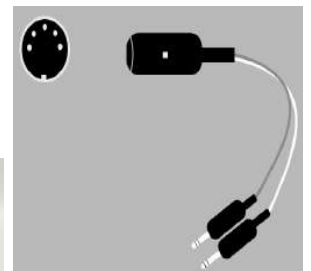




*O **Eletrodo Vaginal** possui 2 pares de anéis que podem ser utilizados. Os **aneis externos** podem ser usados através do **cabo branco no canal 1** e os **aneis internos** podem ser utilizados através do **cabo cinza no canal 2**.






5- Opção 1 (Automático): Selecione o programa de terapia desejado, pressionando a tecla  (Programa) e depois as teclas   (Decrementa e Incrementa), utilize essas teclas de acordo com a cor do cabo que estiver utilizando. As terapias disponíveis estão no manual **página 16**. Passe para o item **7**.


6- Opção 2 (Manual): Selecione através das teclas   (T / Freq.) (Envelop) os parâmetros desejados.

7- Ajuste o tempo de terapia, pressionando a tecla  (Tempo Ciclo) e depois as teclas de incrementa e decrementa  

8- Lubrifique e introduza o eletrodo no paciente (página 26 e 27 do manual).

9- Inicie a terapia pressionando a tecla Iniciar Terapia 


10- Eleve a intensidade de emissão de corrente até a potência desejada, pressionando a tecla (Controle de Intensidade)  e em seguida as teclas  

11- Para interromper a terapia antes do tempo programado, pressione a tecla 

Teste da Água com Eletrodos

Passo a Passo

1- Pegue o equipamento e o(s) Eletrodo(s) Anal e/ou Vaginal para o teste, juntamente com o adaptador e pegue um recipiente e o preencha com água da torneira.

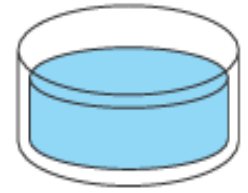

2- Com o equipamento ligado, insira o Eletrodo Anal no canal 1 conectado ao cabo branco do adaptador e o Eletrodo Vaginal conectado ao cabo branco do adaptador (canal 1) ou cinza (canal 2). Vide conexão no item **4** anterior.

ATENÇÃO: inserir os eletrodos em momentos diferentes.

3- Coloque o eletrodo dentro do recipiente de água e selecione o Programa 09, inicie a terapia e aumente até 60mA.



4- Após subir até 60mA, retire o eletrodo da água. A mensagem "**Cabo Partido**" deve aparecer.

* Lembre-se, o Eletrodo Vaginal tem dois canais e o Eletrodo Anal tem somente um canal.

* O Eletrodo Vaginal pode ter sua intensidade aumentada ou diminuída tanto pelas teclas do cabo branco quanto do cabo cinza.

* O Eletrodo Anal somente pode ser utilizado no canal 1 (cabo branco).



Fabricante: Quark Produtos Médicos
Razão Social: Mendes e Barbosa Produtos Médicos
Indústria Brasileira -
CNPJ: 71.769.673/0001-59
Número ANVISA: 80079190022
Rua do Rosário, 1776 - Centro - Piracicaba/SP
CEP: 13.400-186 | Fone: (19) 2105-2800
www.quarkmedical.com.br
quark@quarkmedical.com.br