

# Português

## FIO RETRATOR

### Conteúdo:

250cm

### Indicação:

O fio RETRATOR é indicado para o afastamento gengival em diversas situações como: em prótese na realização de facetas indiretas de preparos protéticos e seu refinamento, bem como na moldagem final pós preparo para que se obtenha modelos otimizados de perfeito assentamento da peça protética. Auxilia ainda nos preparos subgengivais facilitando o acesso e visibilidade dos tecidos e a prevenir os danos no tecido gengival.

### Composição:

Fio de algodão 100%.

### Modo de Uso:

1. Selecionar o fio retrator de acordo com o número desejado. Caso necessário, utilize um hemostático.
2. Cortar o fio com comprimento suficiente para circundar o dente.
3. Mergulhar o fio na solução hemostática.
4. Fazer uma laçada com o fio ao redor do dente. O fio deverá circundar o dente e as pontas devem ficar voltadas para a face vestibular, facilitando a manobra de sua inserção entre a gengiva e o dente.
5. Deixar o fio no local de 3 a 5 minutos, verificando o aspecto do afastamento da gengiva. De acordo com a técnica utilizada, retirar ou não o fio antes da moldagem.

### Precauções:

Uso exclusivo do cirurgião dentista.

Não deixe o fio além do tempo estipulado, pois poderá ocasionar retração gengival.

Não utilizar espátula serrilhada, esta pode lesar o epitélio.

Descarte o fio após o uso.

Mantenha longe do alcance das crianças.

### Condições de Armazenamento e Transporte:

Armazenar em local limpo e seco.

# Español

## HILO DE RETRACCIÓN

### Contenido:

250cm

### Indicación:

El hilo RETRATOR es indicado para la separación gingival en diversas situaciones como: en prótesis en la realización de facetas indirectas de preparaciones protéticas y su refinamiento, así como en el moldaje final pospreparación para que se obtenga modelos optimizados de perfecto asentamiento de la pieza protética. Auxilia aun en las preparaciones subgingivales facilitando el acceso y visibilidad de los tejidos y a prevenir los daños en el tejido gingival.

### Composición:

Hilo de algodón 100%.

### Modo de Uso:

1. Selecionar el hilo retrator de acuerdo con el número deseado. Caso necesario, utilice un hemostático.
2. Cortar el hilo con longitud suficiente para circundar al diente.
3. Sumergir el hilo en la solución hemostática.
4. Hacer un lazo con el hilo alrededor del diente. El hilo deberá circundar al diente y las puntas deben quedar de frente para la cara vestibular, facilitando el manejo de su inserción entre la encía y el diente.
5. Dejar el hilo en el local de 3 a 5 minutos, verificando el aspecto de la separación de la encía. De acuerdo con la técnica utilizada, retirar o no el hilo antes del moldaje.

### Precauciones:

Uso exclusivo del cirujano dentista.

No deje el hilo más allá del tiempo estipulado, pues podrá ocasionar retracción gingival.

No utilice espátula serrillada, ésta puede lesionar al epitelio.

Deseche el hilo después del uso.

Mantenga lejos del alcance de los niños.

### Condiciones de Almacenamiento y Transporte:

Almacenar en local limpio y seco.