

RESPIRON®

Exercitador e incentivador respiratório



FICHA TÉCNICA

1. Ficha Técnica

- **Componentes:** Corpo montado, mangueira e bocal.
- **Materiais:** Corpo: poliestileno cristal / Esferas - Anel - Mangueira: polietileno / Bocal: polipropileno
- **Dimensões:** Corpo montado: 13,5cm x 6,9cm x 14,2cm / Mangueira: 1,6cm x 26,6cm
Bocal: 3,0 cm (eixo maior) x 1,6 cm (eixo menor) x 4,4 cm
Peso: 155g
- **Prazo de Validade:** indeterminado.
- **Garantia:** 5 anos após a data de fabricação
(data de fabricação, nº de série e Lote estão na base do produto).
- **Abrangência:**

MEDIÇÕES **RESPIRON**

Medidas em cm H₂O

NÍVEL	ESFERA	<i>kids</i>	<i>easy</i>	CLASSIC	<i>athletic 1</i>	<i>athletic 2</i>	<i>athletic 3</i>
Nível 0	Esfera 1	4	4	10	15	20	25
Nível 0	Esfera 2	5	5	12	20	30	40
Nível 0	Esfera 3	8	8	15	25	40	55
Nível 1	Esfera 1	5	5	15	25	40	55
Nível 1	Esfera 2	8	8	20	35	50	70
Nível 1	Esfera 3	12	12	25	45	60	85
Nível 2	Esfera 1	8	8	25	45	60	85
Nível 2	Esfera 2	12	12	28	55	70	100
Nível 2	Esfera 3	16	16	30	65	85	120
Nível 3	Esfera 1	12	12	30	65	85	120
Nível 3	Esfera 2	16	16	35	75	100	140
Nível 3	Esfera 3	20	20	40	90	120	190

OBS: Esses valores são aproximados, podendo variar de uma unidade para outra.

2. Embalagens:

- Embalagem individual (com o produto e demais itens):
 - Dimensões: 14,4cm x 7,2cm x 14,4cm
 - Peso: 185g (Kids-Easy-Classic) / 200g (Athletic)
- Embalagem para transporte (com o produto e demais itens):
 - Capacidade: 24 (Kids-Easy-Classic) / 6 unidades (Athletic)
 - Dimensões: 44,5cm x 30cm x 30cm (Kids-Easy-Classic) / 29,8cm x 17cm x 22,8 cm (Athletic)
 - Peso: 5,0kg (Kids-Easy-Classic) / 1,5kg (Athletic)
 - Volume total: 40,05m³ (Kids-Easy-Classic) / 11,55m³ (Athletic)
 - Empilhamento máximo: 13 caixas

3. Higienização e Esterilização:

- **Preparação para higienização:** Desmonte o aparelho separando os componentes.
- **Higienização:**
 - Lave a mangueira e o bocal em água corrente e sabão neutro. Enxague bem e deixe secar.
 - Atenção: Em nenhuma hipótese deve ser utilizado calor, cloro, ácidos ou produtos muito alcalinos para higienização.
- **PRECAUÇÕES:**
 - Antes de cada sessão de seu treinamento, verificar se todos os componentes de seu Respirom estão em condições de uso.
- **Armazenamento:**
 - Armazenar seu Respirom dentro da embalagem e em lugar fresco, limpo e ao abrigo do sol.
- **OBSERVAÇÃO:** As instruções fornecidas acima foram testadas pelo fabricante do aparelho como sendo capazes de preparar seu Respirom para reuso individual.



inspirando saúde,
expirando qualidade.

**NCS Indústria e Comércio
de Equipamentos para Saúde Ltda.**

Rua Aeroporto, 192 - Chácara Marco
Barueri - SP - Brasil - CEP 06419-260
CNPJ 55.198.741/0001-10 / Indústria Brasileira
Tel.: (+55 11) 3809-8700 / Fax: (+55 11) 3809-8718
e-mail: contato@ncsdobrasil.com
www.ncsdobrasil.com

Responsável Técnica:
Angelina Arantes Wagner Rodrigues
CRBM: 11076

Produto Patenteado com marcas de propriedade
do fabricante.



Respiron
Kids / Easy / Classic



contato@ncsdobrasil.com



/user/NCSdoBrasil



/NCSdoBrasil



ncsdobrasil.com/blog/



Respiron
Linha Athletic